

ZAHNAUFHELLUNG

Allgemeine Fragen

? Warum werden unsere Zähne überhaupt dunkler?

Besonders der Verzehr von dunklen Lebensmitteln wie Cola, Tee, Kaffee oder Wein, aber auch Tabakkonsum führt zur Verfärbungen auf den Zähnen. Bestimmte Medikamente und eine schlechte Mundhygiene können ebenfalls die Ursache für Gelbfärbungen der Zähne sein.

? Was passiert bei der Zahnaufhellung?

Bei der Behandlung werden mit dem Wirkstoff Aktivsauerstoff schonend Verfärbungen aus dem Zahnschmelz herausgelöst. Wichtig: Bei der Aufhellung der Zähne wird die Grundfarbe nicht verändert.

? Wie wirkt das Studio Whitening Gel **WHITE** UP by smilestore?

Das Gel enthält aufhellende Inhaltsstoffe, die durch ein LED-Licht aktiviert werden. Diese Inhaltsstoffe wirken auf die färbenden Pigmente im Zahnschmelz und neutralisieren sie. **WHITE** UP kann die Zähne der Kunden auf jeden Fall um ein Vielfaches heller und manchmal auch „weiß“ machen. Dies ist jedoch abhängig von der Ausgangszahnfarbe des Kunden. Die Behandlung ist absolut schmerzfrei und ist nicht schädlich für Zahnschmelz und Zahnfleisch.

? Wie lange hält das Ergebnis?

Wie lange die Zähne hell bleiben können, hängt stark von der Zahnpflege, den verwendeten Zahnpflegeprodukten, dem Zahnschmelz und dem Lebensstil des einzelnen Kunden ab. Grundsätzlich kann das Ergebnis bis zu sechs Monate halten. Übermäßiger Genuss von färbenden Getränken und Speisen sowie Tabak, können zu einer vorzeitigen Verfärbung bzw. Nachdunklung der Zähne führen.

? Gibt es Nebenwirkungen?

Eine kosmetische Zahnaufhellung ist vollkommen unbedenklich und hat keine Nebenwirkungen. Das Studio Whitening Gel **WHITE** UP by smilestore wirkt ohne Wasserstoff-Peroxid, ist chemisch-toxikologisch getestet und als kosmetisches Produkt in der EU zugelassen. Es sind keine Einschränkungen für den zeitlichen Abstand zwischen den Behandlungen zu beachten. Von einer Behandlung während der Schwangerschaft und der Stillzeit raten wir dennoch ab.

? Gibt es vor der Behandlung etwas zu beachten?

Wir empfehlen vor der Zahnaufhellung eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt, insbesondere bei sichtbarem Zahnstein. Bitte informiere die Kunden vor der Behandlung, dass die Behandlung bei künstlichen Zähnen (Veneers oder Kronen) zu keinem signifikanten Ergebnis führt; ggf. können aufliegende Verfärbungen durch das Gel entfernt werden.

ANWENDUNG

mit einem Mundstück

✓ Schritt 1: Activator Spray anwenden.

Nehme dazu ein Wattestäbchen (Baby Q-Tip) zur Hand und sprühe mit dem Activator Spray gleichmäßig auf das Wattestäbchen (ca. drei Sprühstöße).

Reinige nun mit dem Wattestäbchen die im sichtbaren Bereich liegenden Zahnoberflächen im Ober- und Unterkiefer. So wird der Biofilm von den Zähnen schonend entfernt und du erhältst eine saubere Zahnoberfläche.

✓ Schritt 2: Mundstück mit dem **WHITE UP Gel** auffüllen.

Lege dazu einen fortlaufenden und gleichmäßigen Gelstrang in die vorgegebenen Bereiche des Mundstücks. Die Menge sollte ungefähr 1/3 der Gelspritze entsprechen.

✓ Schritt 3: Mundstück in den Mund einsetzen.

Setze das Mundstück vorsichtig in den Mund. Drücke dabei mit den Fingern leicht auf das Mundstück, um die Seiten an die Zähne anzupassen.

Bitte beachte, dass die Lippen das Mundstück nicht abdecken und die Kunden während der Behandlung das Mundstück leicht zugebissen halten, ohne viel Druck.

✓ Schritt 4: Bleachinglampe positionieren.

Stelle die Lampe so ein, dass der vordere Bereich der Zähne genug Licht einfängt. Es ist zwingend notwendig, dass der Kunde während der Behandlung mit der Bleachinglampe eine Lichtschutzbrille aufsetzt, um nicht dauerhaft geblendet zu werden.



Bitte beachte, dass pro Durchgang die Behandlungsdauer von 20 Minuten nicht überschritten werden sollte, da nach dieser Zeit keine Wirkung mehr vom Gel ausgeht.

Grundsätzlich empfehlen wir eine Behandlungsdauer - je nach Ausgangszahnfarbe - 2 x 15, 3 x 15 oder 3 x 20 Minuten. Länger als 60 Minuten ist eine Behandlung nicht notwendig, da keine Aufhellung darüber hinaus erzielt wird.

ANWENDUNG

mit einem Wangenabhalter

✓ Schritt 1: Wangenabhalter in den Mund setzen.

Bringe den Wangenabhalter vorsichtig im Mund an. Bitte beachte, dass der Wangenabhalter die Lippen komplett abdeckt und die Zähne dabei gut sichtbar sind.

✓ Schritt 2: Activator Spray anwenden.

Nehme dazu ein Wattestäbchen (Baby Q-Tip) zur Hand und sprühe mit dem Activator Spray gleichmäßig auf das Wattestäbchen (ca. drei Sprühstöße).

Reinige nun mit dem Wattestäbchen die im sichtbaren Bereich liegenden Zahnoberflächen im Ober- und Unterkiefer. So wird der Biofilm von den Zähnen schonend entfernt und du erhältst eine saubere Zahnoberfläche.

✓ Schritt 3: WHITE UP Gel auf die Zähne auftragen.

Decke dazu mit einem gleichmäßigen Gelstrang die sichtbar liegenden Zähne (5 nach 5) im Ober- und Unterkiefer gleichmäßig ab. Die Menge sollte ungefähr 1/3 der Gelspritze entsprechen. Bitte das Zahnfleisch aussparen.

✓ Schritt 4: Bleachinglampe positionieren.

Stelle die Lampe so ein, dass der vordere Bereich der Zähne genug Licht einfängt. Es ist zwingend notwendig, dass der Kunde während der Behandlung mit der Bleachinglampe eine Lichtschutzbrille aufsetzt, um nicht dauerhaft geblendet zu werden.



Bitte beachte, dass pro Durchgang die Behandlungsdauer von 20 Minuten nicht überschritten werden sollte, da nach dieser Zeit keine Wirkung mehr vom Gel ausgeht.

Grundsätzlich empfehlen wir eine Behandlungsdauer, je nach Ausgangszahnfarbe, 2 x 15, 3 x 15 oder 3 x 20 Minuten. Länger als 60 Minuten ist eine Behandlung nicht notwendig, da keine Aufhellung darüber hinaus erzielt wird.

NACHBEREITUNG



Die Zähne sind direkt nach einer Behandlung anfälliger für Verfärbungen, da der Zahn während der Aufhellung Feuchtigkeit (Speichel) verloren hat. **Deshalb bitte folgende Punkte beachten:**



Empfehle deinen Kunden, 24-48 Stunden nach der Behandlung auf farbiges Essen und Getränke, wie Tomatensauce, Kaffee, Tee oder Wein sowie Tabak, unbedingt zu verzichten.

Es ist normal, wenn nach der Behandlung eine geringfügiges Nachdunkeln der Zähne stattfindet. Das Nachdunkeln kann bei jedem Kunden unterschiedlich ausfallen und ist abhängig von ggf. vorhandenen Transparenzen, Alter des Zahnes und Ähnlichem.

Damit das Ergebnis langfristig erhalten bleibt, empfehle deinem Kunden eines der folgenden Produkte in seine künftige Zahnpflege zu integrieren:



SPLAT White Plus (100ml)

96% natürliche Inhaltsstoffe

- ✓ Unser Bestseller zur schonenden Zahnaufhellung
- ✓ bekämpft aktiv Rückstände von Kaffee, Tee und Wein
- ✓ Premium-Schutz für Ihren Zahnschmelz



SPLAT Extreme White (75ml)

mit Carbamidperoxid

- ✓ intensiver Whitening-Effekt
- ✓ für die tägliche Anwendung geeignet
- ✓ bis zu drei Stufen hellere Zähne in 4 Wochen

optional in Begleitung mit:



Beaming White - Daily White Fusion (50ml)

ohne Peroxid

- ✓ Mundschäum mit innovativer Rezeptur zur Entfernung von lästigen Verfärbungen
- ✓ fördert gesundes Zahnfleisch
- ✓ verleiht ein angenehm frisches Mundgefühl



Whitewash Nano Whitening Set

mit Hydroxylapatit

- ✓ 1x Whitening-Zahnpasta
- ✓ 1x Whitening-Mundspülung

EMPFEHLUNG

Programmgestaltung

Wir empfehlen Dir, die Pflegeprodukte direkt in die Zahnaufhellungspakete mit aufzunehmen. Hier eine kurze Übersicht, wie Du Deine Behandlungen gestalten kannst:

Session Light - Das Richtige bei leichten Zahnverfärbungen



2x 15 Minuten

Zwei Durchgänge á 15 Minuten



Zahnpasta
Option 1



Zahnpasta
Option 2



Session Medium - Das Richtige bei mittleren Zahnverfärbungen



3x 15 Minuten

Drei Durchgänge á 15 Minuten



Zahnpasta
Option 1



Zahnpasta
Option 2



Mundschaum



Session Supreme - Das Richtige bei starken Zahnverfärbungen



3x 20 Minuten

Drei Durchgänge á 20 Minuten



nano-Paket



DEIN ANSPRECHPARTNER

Bei Fragen oder Unklarheiten



← Hier geht's zur Webseite

Entdecke alle relevanten Equipments rundum die Zahnaufhellung zu attraktiven Händlerpreisen.

Bitte beachte, dass die Preise erst nach der Händler-Registrierung sichtbar sind.

Kay Link

smilestore Zahnkosmetik & Dentalfachhandel

📍 Girardetstraße 64
D-45131 Essen

✉️ vertrieb@smilestore-pro.de
☎️ 0201 4535490

🕒 Mo-Fr von 10 bis 16 Uhr

